

Protocole I : Entretien Utilisateur

Équipement	AUTOCLAVE 24 I (All American) ESTEAUTE24- AUTOCLAVE 39 I (All American) ESTEAUTE39-
Responsable	Stérilisateur

A

Vérification des dégâts et nettoyage des surfaces de contact

Fréquence Chaque semaine

Outils Eau claire, savon, Surfanios*, lubrifiant (Vaseline)

Pièces det. Aucun

- Nettoyer les surfaces de l'autoclave en utilisant de l'eau et du savon pour retirer les dépôts de suie et de poussière
 - Désinfecter l'autoclave avec un linge propre non pelucheux humidifié avec Surfanios.
 - Vérifier les surfaces de contact entre le couvercle et la cuve pour d'éventuels dégâts.
 - Lubrifier légèrement les surfaces de contact avec de la graisse pétrole (Vaseline). Cette action doit aussi être effectuée entre chaque cycle de stérilisation.

Le nettoyage à l'eau savonneuse puis la lubrification des surfaces peuvent être effectués entre chaque cycle de stérilisation pour faciliter l'ouverture de l'autoclave.



ATTENTION : N'utiliser qu'une petite quantité de lubrifiant et nettoyer le une fois le cycle de stérilisation terminé.


2

- Ajouter la quantité d'eau nécessaire à un cycle de stérilisation normale.
- Effectuer un cycle de stérilisation et observer le manomètre.



ATTENTION : Si la pression n'augmente pas, alors procéder d'abord à un cycle de nettoyage (Voir "B"). Si ceci ne règle pas le problème, **contacter le maintenancier** pour vérifier la valve de contrôle, la valve de surpression et/ou le manomètre.

N.B. : Certains modèles combinent les fonctions des valves de contrôle et de surpression en une seule valve. Se référer à la documentation technique de votre autoclave pour de plus amples informations.

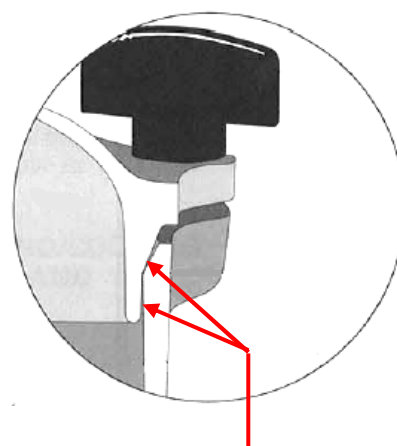

Appliquer du lubrifiant uniquement sur ces points de contacts.

* Pays avec restrictions d'importation un produit équivalent local (validé par le référent Hygiène du siège) peut être utilisé.

B Nettoyage de l'autoclave

Fréquence Chaque mois
Outils Eau, Vinaigre blanc, savon et éponge grattoir.
Pièces det. Aucun

1

- Enlever le dépôt de calcaire en utilisant une solution d'eau et de vinaigre blanc. Utiliser la quantité d'eau nécessaire à un cycle de stérilisation normale et ajouter 4% de vinaigre blanc (ex : pour 2 litres d'eau, ajouter 80ml de vinaigre)

Procédure :


1. Retourner le couvercle à l'envers et faire couler une petite quantité de vinaigre dans les trous des valves de contrôle et de surpression.
2. Laisser agir pendant 15 minutes.
3. Remplir l'autoclave avec le mélange d'eau/vinaigre.
4. Fermer et sécuriser le couvercle.
5. Ouvrir la valve de contrôle afin que la pression dans l'autoclave n'augmente pas.
6. Chauffer l'eau jusqu'à ébullition.
7. Laisser bouillir pendant 30 minutes.
8. Retirer le couvercle et évacuer l'eau de l'autoclave.
9. Remplir de nouveau l'autoclave avec de l'eau claire et rincer abondamment.

2

- Nettoyer les surfaces extérieures de l'autoclave en utilisant une éponge grattoir, du savon et de l'eau.



ATTENTION : Ne jamais utiliser de brosse ou d'éponge métallique pour nettoyer l'autoclave, au risque de rayer les surfaces et de créer des fuites. N'utiliser que des éponges grattoirs.

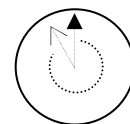

EAU + VINAIGRE
30 minutes