

Equipement

OXYMETRE DE POULS (Masimo RAD-5)

EEMDPOXE4-- pour le modèle actuel RAD-5

Responsable

Staff Médical

A Nettoyer l'appareil, vérifier les piles et le câble patient

Fréquence Chaque jour

Outils Surfanios* et un chiffon non-pelucheux.

Pièces det. Piles (type AA/R6 x 4) si nécessaires

- Eteignez l'appareil et enlevez les piles.
 - Enlevez le câble patient et la housse de protection (s'il y a)
 - Nettoyez l'extérieur de l'appareil, le câble (et housse) avec un chiffon non-pelucheux, mouillé avec une solution Surfanios*.



PRECAUTION : Ne laissez pas de liquides entrer dans l'appareil, ceci endommagera l'oxymètre.

- Des nouvelles batteries de bonne qualité devraient donner 15h d'utilisation, moins pour des batteries rechargeables.

Masimo Rad-5 et Rad-5v:

- Remplacez les piles (attention à la polarité) et vérifiez l'indicateur de batterie.
- S'il n'y a qu'une lumière clignotante, remplacez les piles.

Nellcor Oximax NPB-40:

- Les modèles Nellcor indiquent seulement si l'autonomie des piles est moins de 15min, donc le contrôle est impossible.



ATTENTION : Faites en sorte qu'il y ait suffisamment de stock de batteries et que le stock soit accessible sur demande des équipes infirmières. Débarrassez-vous responsablement des vieilles batteries.





ATTENTION : N'utilisez que des batteries alcalines de bonne qualité. L'utilisation de piles rechargeables est recommandée. Alors il faut les changer chaque fois que l'appareil est nettoyé.




ATTENTION : Enlevez les piles quand l'appareil ne sera pas utilisé plus d'une semaine.

3

- Vérifiez le câble patient pour des dégâts.
- Vérifiez que le câble est correctement connecté au connections câble patient.
- S'il y a un signe de dégâts, testez l'oxymètre sur votre doigt pour vérifier la qualité des résultats.
- Remplacez le câble en cas d'indications erronées ou incorrects.

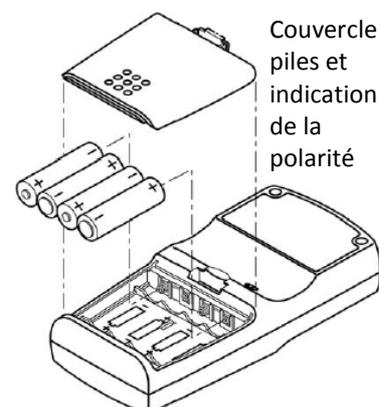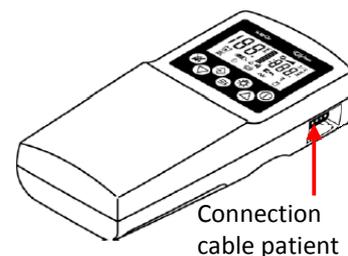


Nellcor Oximax NPB-40

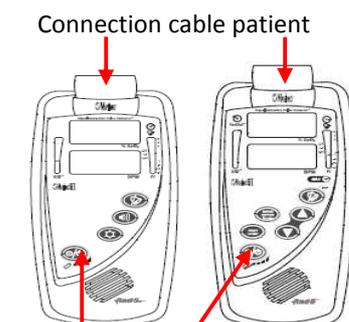

Masimo Rad-5 Masimo Rad-5v

Indicateur batterie

Couvercle piles et indication de la polarité

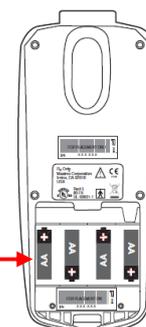

* Pays avec restrictions d'importation un produit équivalent local (validé par le référent Hygiène du siège) peut être utilisé.

B Nettoyer et vérifier le capteur et le câble

Fréquence	Chaque jour et entre chaque patient
Outils	Surfanios* et un chiffon non-pelucheux.
Pièces	Nouveau capteur et/ou autocollant si nécessaire

- 1
 - Eteignez l'oxymètre.
 - Enlevez le capteur du patient et déconnectez-le du câble patient.
 - Nettoyez le capteur (à l'intérieur et l'extérieur, incluant le câble) avec un chiffon non-pelucheux, mouillé avec une solution Surfanios*.
 - Laissez sécher à l'air ou séchez avec un chiffon sec et propre.
 - Reconnectez le capteur au câble patient.
 - Vérifiez que les câbles sont connectés correctement aux connecteurs.
 - Vérifiez que le câble n'est pas endommagé.
 - S'il y a des dégâts, testez l'oxymètre sur votre propre doigt pour vérifier si les résultats sont acceptables.
 - Remplacez le câble en cas de mesures erronées ou incorrectes.
 - Reconnectez le capteur au patient.



ATTENTION : Enlevez le capteur, nettoyez et remettez en place sur un autre doigt chaque 8 heures. Ceci permet à la peau du patient de respirer et ainsi d'éviter des blocages de circulation pour des périodes prolongées.



ATTENTION : Si un capteur adhésif est utilisé et le capteur ne s'accroche plus bien au patient, l'autocollant doit être remplacé.




PRECAUTION : il NE faut JAMAIS accrocher l'oxymètre par le câble ou nouer le câble. Hors utilisation le câble doit rester roulé librement, sinon il pourrait s'endommager.

N.B. : Les connecteurs patients des modèles Masimo RAD-5 et RAD-5V peuvent être rouge ou gris. Les versions actuelles ont un connecteur rouge ; les modèles pré-2010 ont un connecteur gris. Les câbles patients/rallonge sont différents pour chaque modèle. Assurez-vous d'utiliser les bons câbles :

ROUGE : EEMDPOXA406 CABLE, rallonge, rouge, LNC-04 2055

GRIS : EEMDPOXA403 CABLE, extension <2010, blanc, LNC-4 2017

Les capteurs se connecteront aux deux types de câbles, patient ou rallonge.

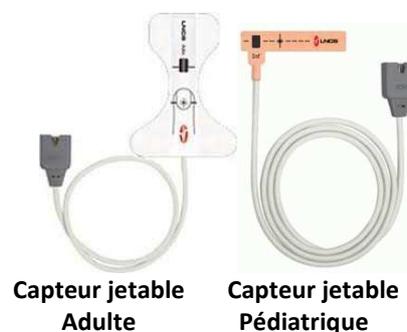

* Pays avec restrictions d'importation un produit équivalent local (validé par le référent Hygiène du siège) peut être utilisé.